



COMAR

Pressure Garments
& Silicones.

URISIL-LINE®

יריעות בד בציפוי סיליקון

URISIL-LINE הינה יריעת בד בציפוי סיליקון מסוג: **medical-grade**, המיועדת לטיפול בצלקות היפרטרופיות או קלואידיות קיימות, או כטיפול מונע בפצעים סגורים על מנת למנוע התפתחות צלקות כאלה, יריעה זו מיועדת לתפירה בתוך או מתחת לבגד הלחץ, או כאצבעון נפרד.

המלצות לטיפול במוצר :

יש לרחוץ את חבישת ה- **URISIL-LINE** (או בגד הלחץ אליו תפורה יריעת הבד מצופה הסיליקון) מידי יום במים עם סבון עדין שאינו שומני ולשטוף במים נקיים פושרים. יש לייבש את היריעה ולהשתמש שוב על הצלקת הנקייה והיבשה.

- יש להימנע משימוש בדטרגנט לניקוי היריעה אשר יכול לגרום לגירוי בעור.
- אין להשתמש במגבות נייר לייבוש מכיוון שהנייר עלול להידבק אליה.
- לתשומת לבך: במזג אויר חם, או אחרי פעילות גופנית והזעה, יש לרחוץ את היריעה לעתים תכופות יותר, כדי להבטיח מגע אופטימאלי עם העור.
- אין להשתמש במשחות באזור הצלקת, בעת השימוש ב- **URISIL**.

יש להשתמש ב- **URISIL** לפחות 12 שעות במשך תקופת הטיפול. אם אפשרי, רצוי להשתמש ביריעה למשך 23 שעות ולהסיר רק לצורך רחיצה. כדי להרגיל את העור יש להתחיל בשימוש במשך 2 שעות ביום-יומיים הראשונים של הטיפול, 4 שעות ביומיים הבאים, ולהאריך את זמן הטיפול בשעתיים ליום עד לזמן טיפול אופטימאלי של 23 שעות ביממה.

**אין להשתמש ב- URISIL על פצעים פתוחים,
באזורים מפרישים או בחולים עם בעיות דרמטולוגיות.**

במקרה של טיפול בצלקת ניתוחית, השימוש ב- **URISIL** אפשרי רק לאחר הסרת התפרים.

אם מתפתחת פריחה בעור המכוסה ביריעה. ניתן לייחס זאת להיגינה נמוכה או לכך שהיריעה הודבקה בלחץ חזק מידי. במקרה של הופעת פריחה, יש להפסיק השימוש ולפנות למרפאה בעיסוק.