

# URISIL<sup>®</sup> MED

## יריעת סיליקון לטיפול בצלקות.

**URISIL** הינה יריעת סיליקון, המכילה 100% סיליקון רפואי המוצמד ליריעה אלסטית וליריעת הגנה, יריעת הסיליקון מיועדת לטיפול חיצוני בלבד בצלקות היפרטרופיות או קלואידיות קיימות, או למניעת התפתחות של צלקות כאלה, לאחר פגיעה. יריעת **URISIL** הינה דביקה וניתנת לחיתוך לצורה וגודל המתאימים לכיסוי הצלקת, ומיועדת לשימוש חוזר. יריעות **URISIL**, מיועדות לריכוך הצלקות, הפחתת אדמומיות ומסייעות להגנה על אזור הצלקת מפגיעה נוספת.

### הוראות שימוש:

- טרם השימוש הראשון, יש לגזור את היריעה לצורת הצלקת כאשר היריעה מכסה את גבולות הצלקת ב-2 ס"מ לפחות מכל כיוון. יש להקפיד על גזירה בקווים מעוגלים.
- לפני כל הנחת הסיליקון יש להקפיד על רחיצה וייבוש מלא של אזור הצלקת. אזור הצלקת צריך להיות יבש ולא משומן.
- יש להסיר את יריעת ההגנה מהצד הדביק של היריעה, ולהניח על אזור הצלקת. במצבי לחות מוגברת (אקלים, הזעה) ייתכן ויהיה צורך להדביק את היריעה באמצעות פלסטר, או להצמידה באמצעות תחבושת אלסטית מעל. במידה וכך, אפקט השפעת הסיליקון לא ייפגע, אלא רק הדביקות. לאחר רחיצת הסיליקון, מתחדשת רמת הדביקות.
- יש להתחיל בשימוש ביריעת **URISIL**, בהדרגה, כשעתיים ביום הראשון, ולאחר מכן, להוסיף כשעתיים-שלוש כל יום, עד למקסימום של 23 שעות ביממה, זאת על מנת לאפשר לעור להתרגל לסיליקון.
- אין להשתמש בקרם או שמן בעת ובעונה אחת עם השימוש בסיליקון.
- אין להשתמש ב יריעת **URISIL**, על פצעים פתוחים.

### טיפול ביריעה:

- יש להסיר ולשטוף את יריעת הסיליקון לפחות פעם ביום, בסבון ידיים פשוט.
- לאחר השטיפה, יש להניח על מגבת, על צד הבד על מנת להספיג עודפי מים. היריעה מתגלגלת כשהיא רטובה, ומתיישרת בתהליך ההתייבשות.
- אין לנגב את הצד הדביק של היריעה, על מנת למנוע הדבקות סיבי מגבת על הסיליקון.
- את יתרת היריעה שאינה בשימוש יש לאחסן באריזה המקורית, במקום יבש, ובטמפרטורה שאינה עולה על 25 מעלות.
- בשימוש על פי ההוראות, אורך חיי היריעה הינו בין 6-8 שבועות.

יש להיוועץ ברופא בכל מקרה של גירוי או בעיה בעור.

מספר רישום אמ"ר 15290000