

URISIL[®]

אוריסיל – יריעות סיליקון

URISIL הינה יריעת סיליקון מסוג: medical-grade, המיועדת לטיפול בצלקות היפרטרופיות או קלואידיות קיימות, או כטיפול מונע בפצעים סגורים על מנת למנוע התפתחות צלקות כאלה.

הוראות שימוש ב-URISIL :

1. חתוך את היריעה בהתאם לגודל הצלקת. ייתכן ויהיה צורך להשתמש במספר יריעות לכיסוי צלקות נרחבות.
2. הסר בזהירות את שכבת הכיסוי מהצד הדביק, והנח את היריעה בצידה הדביק על הצלקת.
3. ניתן להוסיף פלסטר על היריעה, כדי ליצור הצמדות טובה יותר. אין להצמיד חזק מידי לצלקת, כדי למנוע גירוי לצלקת או לסביבתה.
4. את היריעה שאינה בשימוש, יש לשמור באריזה המקורית, במקום יבש, ובטמפרטורה נמוכה מ 25 מעלות.

המלצות לטיפול במוצר :

1. יש לרחוץ את יריעת ה- **URISIL** פעמיים ביום במים עם סבון עדין שאינו שומני ולשטוף במים נקיים פושרים. יש לייבש את היריעה ולהשתמש שוב על הצלקת הנקייה והיבשה.

- יש להימנע משימוש בדטרגנט לניקוי היריעה אשר יכול לגרום לגירוי בעור.
- אין להשתמש במגבות נייר לייבוש מכיוון שהנייר עלול להידבק אליה.
- לתשומת לבך: במזג אויר חם, או אחרי פעילות גופנית והזעה, יש לרחוץ את היריעה לעתים תכופות יותר, כדי להבטיח מגע אופטימאלי עם העור.

2. יש להשתמש ב- **URISIL** לפחות 12 שעות במשך תקופת הטיפול. אם אפשרי, רצוי להשתמש ביריעה למשך 23 שעות ולהסיר רק לצורך רחיצה.
3. כדי להרגיל את העור יש להתחיל בשימוש במשך 2 שעות ביום-יומיים הראשונים של הטיפול, 4 שעות ביומיים הבאים, ולהאריך את זמן הטיפול בשעתיים ליום עד לזמן טיפול אופטימאלי של 23 שעות ביממה.
4. את היריעה יש להחליף כאשר היא משומשת מידי ואינה ניתנת לרחיצה. בשימוש עפ"י ההוראות, יש להחליף את היריעה לאחר שימוש שבין 14-28 ימים. אורך חיים קצר יותר, יכול להיות במקרה של צלקת הממוקמת על מפרק או באזור הנתון לחיכוך תמידי.
5. אין להשתמש במשחות באזור הצלקת, בעת השימוש ב- **URISIL**.

**אין להשתמש ב- URISIL על פצעים פתוחים,
באזורים מפרישים או בחולים עם בעיות דרמטולוגיות.**

במקרה של טיפול בצלקת ניתוחית, השימוש ב- **URISIL** אפשרי רק לאחר הסרת התפרים.

אם מתפתחת פריחה בעור המכוסה ביריעה. ניתן לייחס זאת להיגינה נמוכה או לכך שהיריעה הודבקה בלחץ חזק מידי. במקרה של הופעת פריחה, יש להפסיק השימוש ולפנות למרפאה בעיסוק.